

Artikelnummer:	02-124; 02-126; 02-138;
EAN Code:	4260206623663; 4260206624066; 4260206628835
Gebrauchsanweisung:	<p>"Beschreibung: Die WUNDmed Blasenpflaster ohne Glycerol sind gelatinefreie Hydrocolloid-Pflaster, die bei Kontakt mit Wundflüssigkeit ein Gel bilden. Durch den PE-Schaumverband auf der Rückseite wird die Wunde gepolstert und reibt nicht, was zur Schmerzlinderung beiträgt.</p> <p>Verwendungszweck: Die Blasenpflaster werden als Schutzbarriere bei folgenden Wundtypen verwendet: Blasen, Hühneraugen, Schwielen, Ballenzeh, mittelschwere Akne, nässende Schnitte und Schrammen, Blasen und leichte Verbrennungen.</p> <p>Gegenanzeigen: Nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile, insbesondere Polyisobutene und Carboxymethylcellulose.</p> <p>Vorsichtsmaßnahmen: Nicht auf infizierten Wunden anwenden. Wenn Sie Diabetiker sind oder Kreislaufprobleme haben, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt anwenden. Sollte die gewünschte Heilung ausbleiben oder die umliegende Haut sich röten und anschwellen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Verwenden Sie das Pflaster nur einmal. Die Wiederbenutzung kann zu Kreuzinfektionen führen und die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Nicht zusammen mit Cremes verwenden, da dadurch das Pflaster unter Umständen nicht mehr auf der Wunde haftet und der Behandlungserfolg beeinträchtigt wird. Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet/beschädigt ist. Nicht verwenden bei blutenden Wunden/Verbrennungen dritten Grades.</p> <p>Gebrauchsanleitung: Waschen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife und trocknen Sie ihn gründlich ab, da Öle und Feuchtigkeit die Haftung des Pflasters beeinträchtigen. Bei aufgeplatzter Blase wenden Sie ein mildes Desinfektionsmittel an. Ziehen Sie die große Lasche der Trennfolie ab. Platzieren Sie das Pflaster zentral auf dem betroffenen Bereich. Ziehen Sie die kleine Lasche der Trennfolie ab. Drücken Sie das Pflaster auf der umliegenden Haut an. Ziehen Sie das Pflaster nicht ab, bevor es sich von alleine zu lösen beginnt. Wiederholen Sie die Anwendung, bis der Heilungsprozess abgeschlossen ist.</p> <p>Pflaster entfernen: Pflasterränder vorsichtig anheben und gleichzeitig die Haut nach unten drücken. Ränder weiter anheben, bis sich diese von der Hautoberfläche lösen. Auf die Haut drücken, um das Pflaster von der Haut zu trennen. Alternativ: Horizontales Dehnen und Anheben des Pflasters erleichtert in den meisten Fällen das Entfernen. Pflaster ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Wie oft muss das Pflaster gewechselt werden: Das Pflaster sollte so lange wie möglich an der Wunde haften. Tritt Feuchtigkeit aus, sollte es unverzüglich gewechselt werden. Das Pflaster muss ausgewechselt werden, wenn die maximale Absorption erreicht wurde."</p>