

# PRIMASTER.

## Bedienungsanleitung

Modell Nr. AL-218S-057

GTIN: 2077664001177



Stand: 2020-01

# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Verwendete Symbole.....	3-4
3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
4. Sicherheitshinweise.....	5-6
5. Lieferumfang.....	6
6. Lieferumfang prüfen.....	6
7. Teilebeschreibung.....	7
8. Erstinbetriebnahme.....	8
8.1. Rollator auseinanderfalten.....	8
8.2. Zubehör montieren.....	8
9. Einstellungen.....	9
9.1. Griffhöhe richtig einstellen.....	9
9.2. Bremsen richtig einstellen.....	10
10. Gebrauch.....	10
10.1. Allgemeine Hinweise zum Gebrauch.....	10-11
10.2. Richtig mit dem Rollator gehen.....	11
10.3. Bremse benutzen.....	11
10.3.1. Bremsen während des Gehens.....	12
10.3.2. Bremsen feststellen und lösen.....	12
10.4. Hindernisse überwinden.....	12
10.5. Sitz richtig benutzen.....	13
11. Rollator zusammenfalten.....	13
12. Reinigung.....	14
13. Wartung.....	14-15
14. Aufbewahrung.....	15
15. Transport.....	16
16. Entsorgungshinweise.....	16
17. Technische Daten.....	16

# 1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Rollator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu

schweren Verletzungen führen. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Rollator an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF Datei im Online Shop unter dem Link [www.globus-baumarkt.de/Artikeldokumente](http://www.globus-baumarkt.de/Artikeldokumente) abgerufen und vergrößert werden.

## 2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollator oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



Das Produkt ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Max. Breite 576 mm



Höhenverstellbar von 810 – 930 mm



Max. Benutzergewicht: 136 kg.



Max. Belastbarkeit Tragetasche: 3 kg.



Hersteller



Herstellungsjahr



Für den Innen- und Außenbereich

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit vorgesehen. Er soll Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Der Rollator ist nicht geeignet für unebenes oder steiles Gelände. Der Rollator ist für den Privatgebrauch vorgesehen und darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden.

Der Rollator ist ein Medizinprodukt und konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Der Rollator ist kein Spielzeug.

Die maximalen Belastbarkeiten des Rollators und des Zubehörs dürfen nicht überschritten werden.

Verwenden Sie den Rollator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch und Einhaltung aller Sicherheits-, Wartungs- und Pflegehinweisen gemäß dieser Bedienungsanleitung 5 Jahre.

Sofern sich der Rollator nach dieser Zeit weiterhin in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, kann dieser weiterhin verwendet werden.

## 4. Sicherheitshinweise



Unsachgemäßer Umgang mit dem Rollator kann zu schweren Verletzungen führen. Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise:

- Der Rollator kann von Erwachsenen Personen bis 136 kg benutzt werden.
- Benutzen Sie den Rollator nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Mitteln stehen, die Ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit beeinflussen (z. B. Medikamente oder Alkohol).
- Gehen Sie mit dem Rollator nur auf ebenem und waagrechttem Untergrund. Verwenden Sie den Rollator nicht auf Kies oder Sand oder ähnlich instabilen und unebenen Untergründen. Verwenden Sie den Rollator nicht bei schlechtem Wetter und gehen Sie mit dem Rollator niemals auf sehr nassen, rutschigen oder eisigen Untergründen (z. B. Eis und Schnee).
- Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Verwenden Sie den Rollator jedoch nicht bei sehr kalten oder sehr warmen Temperaturen. Die Oberfläche des Rollators kann die jeweilige Temperatur annehmen. Nehmen Sie den Rollator daher niemals mit in die Sauna oder das Dampfbad.
- Gehen Sie mit dem Rollator nicht in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Vermeiden Sie es, mit dem Rollator über Gullydeckel, Gitterroste, Bodenvertiefungen und ähnliches zu fahren. Die Reifen könnten sich in den Unebenheiten verfangen.
- Gehen Sie mit dem Rollator nur auf dem Gehweg. Nutzen Sie die Fahrbahn nur zum Überqueren. Tragen Sie immer helle Kleidung und zusätzliche Reflektoren am Körper.
- Überschreiten Sie nie die maximalen Belastbarkeiten des Rollators. Das maximale Benutzergewicht für den Rollator beträgt 136 kg. Die maximale Belastbarkeit Tragetasche beträgt jeweils 3 kg.
- Verwenden Sie den Rollator niemals als Rollstuhl oder Transportmittel für Menschen. Schieben Sie den Rollator nicht, wenn jemand auf dem Rollator sitzt.
- Verwenden Sie den Rollator niemals auf Treppen, Rolltreppen oder Rollsteigen.
- Verstauen Sie Gegenstände immer nur in der mitgelieferten Tragetasche. Die Tragetasche muss ordnungsgemäß angebracht sein. Hängen Sie keine Beutel oder Taschen an den Rollator und transportieren Sie keine Gegenstände, die lose auf dem Rollator liegen, über weite Strecken.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Rollator vor. Verändern Sie insbesondere die beweglichen Teile des Rollators nicht. Die sichere Verwendung des Rollators ist dann nicht mehr gewährleistet. Zudem können Sie sich quetschen oder klemmen.
- Wenn Sie sich auf den Rollator setzen oder ihn abstellen, müssen beide Feststellbremsen festgezogen sein. Der Rollator ist nur zum kurzzeitigen Sitzen geeignet und keinesfalls als Stuhl zum dauerhaften Sitzen geeignet.
- Verwenden Sie die Aufstehhilfen nur, wenn beide Feststellbremsen fest angezogen sind.
- Nehmen Sie den Rollator niemals als Aufstiegshilfe oder als Leiter. Stellen Sie sich niemals auf den Rollator.
- Achten Sie darauf, dass die Bremszüge nicht in die Reifen gelangen können.



**WARNUNG!**

## **Verbrennungsgefahr!**

- Setzen Sie den Rollator keiner direkten Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Hitzequellen aus. Stellen Sie den Rollator nicht vor offenes Feuer. Einzelne Teile des Rollators können sehr heiß werden.

**HINWEIS!**

## **Beschädigungsgefahr!**

- Schützen Sie den Rollator vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen. Die Teile des Rollators können ausbleichen und mit der Zeit beschädigt werden.

## **5. Lieferumfang**

- 1 Rollator
- 1 Tragetasche
- 1 Rückenhaltegurt
- 1 Bedienungsanleitung

## **6. Lieferumfang prüfen**

**<BK 9-G°**

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie den Rollator oder die Zubehörteile beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist, und ob der Rollator oder die Zubehörteile Schäden

aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Rollator nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## 7. Teilebeschreibung

1. Handgriff
2. Ankipphilfe
3. Rückseitiger Reflektor am Handgriff
4. Bremshebel
5. Rastknopf für Schiebegriff
6. Rückengurt
7. Sitz
8. Tasche
9. Rollatorsicherung / Taschenhalter
10. Bremsen-Einstellschraube
11. Hinterrad
12. Vorderrad



### Typenschild

**PRIMASTER.**

Ordernr.: 1.019.316 / WGR: 766  
GTIN: 2077664001177  
Modell: AL-218S-057  
Max. Benutzergewicht: 136 kg  
Max. Breite: 576 mm  
Höhenverstellung:  
von 810 bis 930 mm

CE

2020-11  
 Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen,  
Germany

## 8. Erstinbetriebnahme

Der Rollator wird zusammengefasst und mit vormontiertem Zubehör geliefert. Bevor Sie den Rollator zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die nachfolgenden Schritte beachten:

### 8.1. Rollator auseinanderfalten


1. Rollator auf die Räder stellen
2. Öffnen Sie den Sicherungshaken, der die Haltestangen zusammenhält.
3. Nun drücken Sie die Sitzfläche mittig mit beiden Händen nach unten bis diese einrastet.



**Verletzungsgefahr!**

4. Klappen Sie den Rollator auseinander, bis die Sitzfläche gespannt ist. Die Arretierung des Klappmechanismus' muss eingerastet sein.

Die Griffhöhe ist bei der Lieferung auf die niedrigste Höhe eingestellt. Stellen Sie die Griffhöhe auf Ihre Körpergröße ein (s. Kapitel 9.1 „Griffhöhe richtig einstellen“).

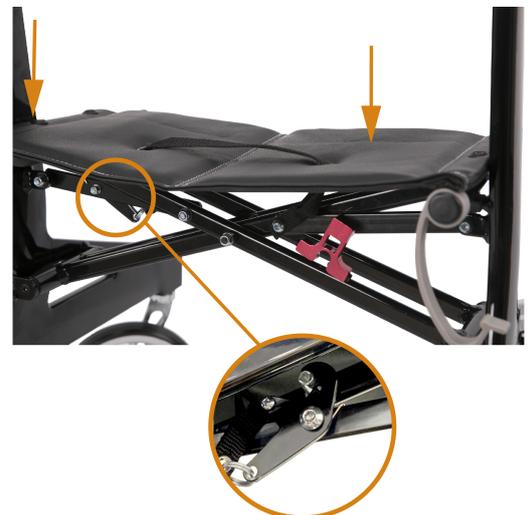

### 8.2. Zubehör montieren

Die Zubehörteile können je nach Bedarf montiert oder demontiert werden. Sie müssen nicht alle für eine ordnungsgemäße Nutzung montiert sein.

## 9. Einstellungen

Um den Rollator sicher verwenden zu können, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen und regelmäßig überprüfen.



### 9.1. Griffhöhe richtig einstellen



Um die richtige Höhe der Griffe zu ermitteln, stellen Sie sich aufrecht hin und lassen Sie die Arme locker hängen. In dieser Stellung müssen Sie die Griffe locker umfassen können. Die Griffe können auf sechs verschiedene Griffhöhen eingestellt werden. Diese sind auf der Innenseite markiert. Die maximale Einstellhöhe ist Stufe 6. Diese ist auf der Innenseite durch einen weißen Markierungstreifen gekennzeichnet.

1. Drücken Sie unten auf den Rastknopf für die Höheneinstellung des Schiebegriffes und ziehen Sie dabei den Griff nach oben.
2. Sobald der Griff sich bewegen lässt, lassen Sie den Knopf los.
3. Dieser arretiert dann automatisch in der nächstmöglichen Höhe.
4. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie die gewünschte Höhe haben.



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

- Verwenden Sie den Rollator nur mit für Ihre Körpergröße korrekt eingestellter Griffhöhe. Nur mit richtig eingestellter Griffhöhe können Sie falsche Belastungen und Verletzungen vermeiden.
- Die Griffe müssen auf beiden Seiten auf die gleiche Höhe eingestellt sein.
- Die Griffe können nur auf die markierten 6 Stufen eingestellt werden. Stellen Sie die Griffhöhe nicht auf Zwischenstufen ein. Die Feststellschrauben treffen dann nicht auf die vorgebohrten Löcher und es ist keine sichere Verwendung des Rollators möglich.

## 9.2. Bremsen richtig einstellen

Beim Erwerb des Rollators sind die Bremsen richtig eingestellt. Durch die Abnutzung der Räder und allgemeinen Verschleiß müssen die Bremsen nach einiger Zeit nachgezogen werden. Dies erkennen Sie daran, dass die Bremsleistung nachlässt oder der Rollator ungleichmäßig bremst.



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

- Nicht ausreichend eingestellte Bremsen können zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.
- Verwenden Sie den Rollator nur, wenn die Bremsen korrekt eingestellt sind. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Bremsen ausreichend bremsen.
- Verwenden Sie den Rollator nicht mehr, wenn sich die Bremsen nicht mehr richtig einstellen lassen (z. B. weil die Räder zu sehr abgenutzt sind).



Linksdrehung: Bremse schwächer  
Rechtsdrehung: Bremse stärker

1. Ziehen Sie die Einstellhülse in Richtung Hinterrad herunter.
2. Wenn Sie die Einstellschraube weiter in Richtung Hinterrad drehen, verringert sich der Abstand zwischen Bremsklotz und Hinterrad. Die Bremskraft erhöht sich, wenn Sie zwischen Einstellhülse und Vorderrad drehen. Wenn Sie die untere Einstellschraube auf die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie die Einstellhülse wieder nach oben.
3. Überprüfen Sie die Bremswirkung. Betätigen Sie auch die Feststellbremse und prüfen Sie, ob sich diese mit leichtem Druck betätigen lässt. Ist die Bremswirkung nicht zufriedenstellend, wiederholen Sie den Vorgang.



## 10. Gebrauch

### 10.1. Allgemeine Hinweise zum Gebrauch



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden allgemeinen Hinweise zum Gebrauch des Rollators. Diese Hinweise, die Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung sind für einen sicheren Gebrauch unbedingt zu beachten!

- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Rollators. Verwenden Sie den Rollator nicht, wenn Sie äußere Schäden feststellen.
- Prüfen Sie vor Gebrauch immer den festen Sitz aller Schrauben.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob die Bremsen einwandfrei funktionieren.
- Der Rollator ist eine Gehhilfe. Verwenden Sie den Rollator ausschließlich, um sicherer zu gehen. Verwenden Sie den Rollator nicht als Rollstuhl oder ähnliches.
- Regen, Nässe und Dreck können die Bremsleistung des Rollators negativ beeinträchtigen.
- Fahren Sie schräg an Hindernisse und Schwellen heran. Bugsieren Sie die Räder einzeln darüber.
- Vermeiden Sie ungeeignete Untergründe und Wege. Fahren Sie mit dem Rollator nicht über Kies, Sand oder ähnliche, unebene Untergründe.
- Auf abschüssigen Wegen kann die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher werden als Ihre Gehgeschwindigkeit. Es besteht erhöhte Sturzgefahr! Bremsen Sie ausreichend und gehen Sie sehr vorsichtig.

## 10.2. Richtig mit dem Rollator gehen



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

- Der Rollator muss beim Gehen immer eng am Körper gehalten werden, damit er eine gute Stütze ist und einen sicheren Gang ermöglicht. Ist der Rollator beim Gehen zu weit vom Körper entfernt oder wenn Sie zu gebeugt gehen, kann der Rollator leicht nach vorne weggrollen. Sturzgefahr!
  - Gehen Sie immer aufrecht und halten Sie den Blick nach vorne gerichtet.
  - Verwenden Sie den Rollator nur, wenn die Griffhöhe für Ihre Körpergröße richtig eingestellt ist (s. Kapitel „Griffhöhe richtig einstellen“).
1. Lassen Sie die Arme locker hängen und umfassen Sie die Griffe ohne großen Kraftaufwand.
  2. Stützen Sie sich beim Gehen auf den Rollator und stabilisieren Sie so Ihr Gehen.
  3. Gehen Sie aufrecht. Halten Sie den Blick vorwärtsgerichtet.

## 10.3. Bremse benutzen



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

- Betätigen Sie immer beide Handbremshebel gleichzeitig, da jede Bremse nur auf ein Rad wirkt.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Bremsen nicht die Finger quetschen und mit den Fingern nicht zwischen Rahmen und Bremshebel gelangen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die einwandfreie Funktion der Bremsen.



### 10.3.1. Bremsen während des Gehens

- Um Ihre Gehgeschwindigkeit zu reduzieren, ziehen Sie beide Handbremshebel leicht nach oben.
- Bremsen Sie immer langsam und gleichmäßig mit beiden Händen.
- Ziehen Sie fester, um eine stärkere Bremsleistung zu erzielen.



Wenn der Rollator ungleichmäßig bremst, müssen Sie die Bremsen neu einstellen (s. Kapitel „Bremsen richtig einstellen“).

### 10.3.2. Bremsen feststellen und lösen



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Stellen Sie die Feststellbremse beim Anhalten und Parken immer auf beiden Seiten fest.
- Drücken Sie beide Handbremshebel so weit herunter, dass die Handbremshebel einrasten. Der Rollator lässt sich jetzt nicht mehr fahren.
- Zum Lösen der Feststellbremsen, ziehen Sie die Handbremshebel wieder in die mittlere Stellung.



### 10.4. Hindernisse überwinden



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Halten Sie den Rollator beim Überwinden von Hindernissen gut fest.
- Beim Heruntergehen von Bordsteinen ist besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie den Rollator nicht auf Treppen.
- Neigen Sie den Rollator nicht mehr als 5 Grad zur Seite.
- Treten Sie auf die Ankipphilfe und ziehen Sie den Rollator an beiden Griffen zu sich, um die Vorderräder anzuheben.
- Fahren Sie Hindernisse schräg an und heben Sie die Vorderräder nacheinander über das Hindernis.



## 10.5. Sitz richtig benutzen



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Setzen Sie sich nur dann auf den Rollator, wenn beide Feststellbremsen betätigt sind.
- Lassen Sie sich nicht schieben, wenn Sie auf dem Rollator sitzen. Schieben Sie keine andere Person, die auf dem Rollator sitzt. Es besteht Sturzgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf den Rollator, wenn der Untergrund sehr glatt und rutschig ist. Trotz betätigter Feststellbremsen kann der Rollator wegrutschen.
- Der Sitz darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden.
- Lehnen Sie sich nicht nach hinten, setzen Sie sich nur aufrecht auf den Rollator.
- Stellen Sie beide Feststellbremsen mit den Handbremshebeln fest.
- Setzen Sie sich auf die Sitzfläche des Rollators. Achten Sie darauf, dass Sie mit beiden Füßen den Boden berühren. Setzen Sie sich mittig auf die Sitzfläche.

## 11. Rollator zusammenfalten



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Falten Sie den Rollator vor jedem Transport vorsichtig zusammen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- 

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

- Stellen Sie vor dem Zusammenfalten sicher, dass in der Tragetasche keine Gegenstände sind, die beim Falten kaputtgehen könnten.
- Ziehen Sie das Zugband des Klappmechanismus mit etwas Kraft nach oben. Der Rollator faltet sich zusammen.
- Sichern Sie den zusammengefalteten Rollator mit der Rollatorsicherung, damit sich dieser nicht versehentlich wieder auseinanderfaltet. Achten Sie darauf, dass die Rollatorsicherung richtig einrastet.



## 12. Reinigung

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel bzw. Desinfektionsmittel.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

Reinigen Sie den Rollator mit einem weichen, feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Rollator anschließend gut ab. Lassen Sie den Rollator nach der Reinigung noch einige Zeit trocknen, damit auch schwierig erreichbare Stellen gründlich trocknen können. Insbesondere die Räder, Griffe und Bremseinrichtungen müssen vollständig trocken sein, bevor Sie den Rollator erneut verwenden.

## 13. Wartung

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionstüchtigkeit des Rollators. Überprüfen Sie dafür die folgenden Punkte:

- Die Bremsen sind einwandfrei funktionsfähig.
- Die Räder sind einwandfrei funktionsfähig. Alle Räder lassen sich ordnungsgemäß drehen und die Vorderräder lassen sich schwenken. Die Reifen weisen keine starken Abnutzungsspuren auf.

- Alle Schraubverbindungen sitzen fest.
- Der gesamte Rollator ist frei von Beschädigungen, Anrissen und groben Verschmutzungen.
- Die Arretierung des Rollators unter der Sitzfläche ist frei von Beschädigungen und Verschmutzungen.
- Die Arretierung funktioniert einwandfrei.



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

Verwenden Sie den Rollator nicht, wenn die Funktionstüchtigkeit des Rollators nicht oder nur eingeschränkt gewährleistet ist. Auch kleinere Beschädigungen oder Verschmutzungen (z. B. an der Arretierung des Rollators) können zu Verletzungen und Unfällen führen.

## 14. Aufbewahrung



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie den Rollator längere Zeit nicht verwenden, sichern Sie den Rollator mit der Feststellbremse gegen Wegrollen und stellen Sie den Rollator nur dort ab, wo niemand über diesen fallen kann.

Wenn Sie den Rollator für längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie den Rollator (s. Kapitel „Reinigung“).

Sichern Sie den Rollator durch Feststellen der Bremse gegen Wegrollen. Bewahren Sie den Rollator an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie den Rollator vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie den Rollator für Kinder unzugänglich auf.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**

Lassen Sie den Rollator nie über einen längeren Zeitraum draußen stehen und setzen Sie den Rollator keinen schlechten Witterungsbedingungen aus. Es können Schäden am Rollator entstehen.

## 15. Transport

Falten Sie den Rollator für den Transport zusammen (s. Kapitel „Rollator zusammenfalten“). Achten Sie darauf, dass der Rollator während des Transports ordnungsgemäß gesichert ist. Treffen Sie ggf. zusätzliche Vorkehrungen zur Transportsicherung.

## 16. Entsorgungshinweise

### 16.1. Rollator und Verpackung

Werfen Sie die Verpackung und das Produkt nicht in den Hausmüll. Das Produkt und die Verpackung bestehen aus wiederverwendbaren Stoffen.

Entsorgen Sie ein nicht mehr verwendbares Produkt umweltgerecht, entsprechend den örtlich geltenden Regelungen.

## 17. Technische Daten

GTIN: 2077664001177

Modellnummer: AL-218S-057

### Rollator:

Maximales Benutzergewicht Rollator:	136 kg
Maximale Belastbarkeit Tragetasche:	3 kg
Gewicht des Rollators (ohne Zubehör):	7,3 kg
Gewicht des Rollators (mit Zubehör):	7,9 kg
Max. Aufstellmaß (L x B x H):	694 x 576 x 930 mm
Maße Sitzfläche (L x B):	460 x 220 mm
Sitzhöhe:	500 mm
Griffhöhe:	6-fach verstellbar, von 810 – 930 mm

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
Germany