



Gebrauchsanweisung

Leichtgewichtsrollator



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 120 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der unter der Sitzfläche eingehängte Drahtkorb ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen. Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstieghilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

1. Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung.
2. Betätigen Sie die Feststellbremse.
3. Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff.
4. Drücken Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus nach unten bis er spürbar einrastet.
5. Klappen Sie den Sitz nach unten.
6. Klappen Sie die Rückenlehne in Gebrauchsposition und hängen Sie den Korb von vorn am Rahmen ein.




Falten des Rollators

1. Nehmen Sie den Korb vom Rahmen ab.
2. Positionieren Sie den Rollator in Fahrtrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen.
3. Klappen Sie den Sitz hoch.
4. Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff.
5. Lösen Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus mit einem Ruck aus der Verankerung.
6. Nun ziehen Sie den Rollator ganz zu sich heran.



Schiebegriff einstellen

1. Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse.
2. Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschraube ganz heraus.
3. Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe (Empfohlen: Schiebegriffe sollten sich in Höhe des Handgelenks befinden).
4. Anschließend sind die Befestigungsschrauben wieder einzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen.
5. Achten Sie darauf, dass die Schraube komplett in der Bohrung versinkt.
6. Zum Verstauen des Rollators können Sie die Schiebegriffe auch ganz aus dem Rahmen herausnehmen.

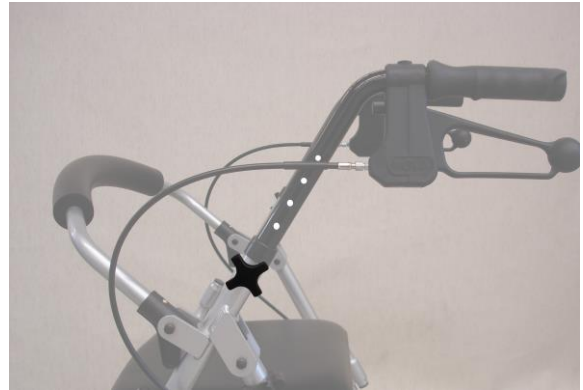

Betriebs- und Feststellbremse

1. Die Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben), durch Ziehen des Bremshebels nach oben verwendet.
2. Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet.



Bremseinstellung

1. Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden.
2. Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen.



Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe.
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenen horizontalen und festen Untergrund (wenn Nutzung doch auf abschüssigen Wegen: Betriebsbremse benutzen)
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
- Beim Zusammenklappen des Rollators können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung und Reparatur

Der Rollator ist wartungsfrei. Wartung und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Wiedereinsatz

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz des Rollators denken Sie bitte daran sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer zu übergeben. Der Rollator muss durch autorisiertes Fachpersonal, wie oben angegeben überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Lieferumfang

- Rollator
- Einkaufskorb
- Gebrauchsanweisung

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	120 kg / 3kg Einkaufskorb
Gesamtgewicht:	7,7 kg
Gesamtbreite:	585 mm
Gesamttiefe:	760 mm
Gesamthöhe:	800 – 910 mm
Abstand zwischen den Handgriffen:	480 mm
Wendedurchmesser:	970 mm
Sitzhöhe:	540 mm
Verstellungen:	Schiebegriff: 800 – 910 mm (5-fach verstellbar)
Bereifung:	Ø 195 x 37 mm, pannensicher

Stand: 01/2016/Rev.4